

# SALIVA COVID 19 TEST



## ANTIGENNÍ TEST ZE SLIN



- **nejpohodlnější antigenní test pro odběr vzorku na trhu**
- **analýza vzorku v rozmezí 15-20 minut**
- **schopnost analyzovat vzorky i s novou mutací COVID 19**
- **sensitivita 95,10 % - specifická 100 %**

Ideální pro firmy pro opakované používání - včasné zamezí šíření nemoci.

Pomáhá snížit náklady na nemocenskou či výpadky provozu.

Při odběru nehrozí žádné poranění nosní sliznice neopatrným odběrem.

Odběr je zcela bezbolestný a bez nepříjemných pocitů.

certifikace  
a doporučení



EU CE Certifikace  
BfARM: AT 527/20



EMERGENCY  
USE AUTHORIZATION



WHO  
EMERGENCY USE LISTING

NÁVOD NA 2. STRANĚ


Vzhledem ke snadné manipulaci s testováním ze slin, je tento test vhodný i pro starší osoby, osoby trpící psychickými problémy apod. Zároveň je tento druh testování vhodný i pro děti.



test osvobozen od DPH / 1 balení = 20 testů

Objednávejte

# ANTIGENNÍ TEST ZE SLIN

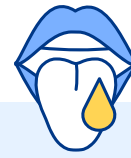

- nejpohodnější antigenní test pro odběr vzorku na trhu
- analýza vzorku v rozmezí 15-20 minut
- schopnost analyzovat vzorky i s novou mutací COVID 19
- sensitivita 95,10 % - specificita 100 %



## SADA PO VYBALENÍ



A testovací kazeta  
vybalená / zabalená



B sáček  
na odběr vzorku



C roztok pufr  
(Buffer)



D pipeta






E extrakční  
zkumavka  
F víčko

## NÁVOD K POUŽITÍ

Testovací sada musí mít před testováním pokojovou teplotu 15-30°C. Před testováním si umyjte / vydezinfikujte ruce.

- 1) Odeberte dostatečný objem slin do přiloženého sáčku (A)
- 2) Pipetou (D) naberte / sliny ze sáčku (A) a 3 kapky odkápněte do extrakční zkumavky (E)
- 3) Lahvičku s roztokem (C) odšroubujte a celý obsah vylijte do extrakční zkumavky (E)
- 4) Extrakční zkumavku (E) s obsahem slin a roztoku uzavřete víčkem (F) a důkladně promíchejte protřepáním (zkumavku (E) lze i promáčkat)
- 5) Vyjměte testovací kazetu (A) z foliového sáčku, položte na čistý a rovný povrch. Tělo extrakční zkumavky (E) lehce stlačte a do kulaté jamky ve spodní části značené „S“ kápněte 3 kapky zpracovaného vzorku (sliny+roztok). Výsledky jsou za 15-20 minut. Výsledek po 20 minutách je dále neplatný.

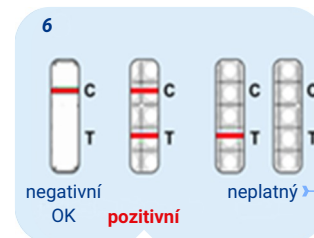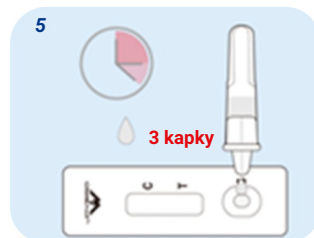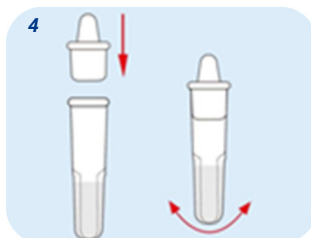

**Kontaktujte lékaře. Udržujte si  
rozesťup, použijte ochranu nosu a úst.**

- Chraňte před mrazem
- Testovací kazeta by měla být použita do 1 hodiny od vyjmutí z hliníkové fólie. Chraňte ji před slunečním zářením, vlhkostí a teplem
- Vzorek odeberte nejlépe ráno po probuzení. Pokud později tak 1 hodinu před odběrem vzorku nejezte, nepijte a nekuřte.
- Sadu nepoužívejte po uplynutí data spotřeby. Použitou testovací kartu znovu nepoužívejte.
- Negativní výsledek může nastat, pokud je přítomen virus SARS-CoV-2 ve vzorku pod citlivostí soupravy.
- Nedostatečný nebo neodborný odběr vzorku, špatné skladování a přeprava mohou vést k nesprávným výsledkům testu.
- Neplatné výsledky mohou nastat, pokud se na testovací kartu přidá nedostatečný objem extrakčního činidla (roztoku). ←
- Použitý test je klasifikován jako biologický odpad. Nevyhazujte do směsného. Postupujte dle odpadového hospodářství

Kupující potvrzuje, že testy budou prováděny pouze pro komerční a lékařské účely a výrobky budou předány příslušnému zdravotnickému personálu.